

Adesivo monocomponente "one-bottle" che va **oltre la 7a generazione** automordenzante e fotoindurente. Il **nuovo** monomero 3D-SR (self-reinforcing), sviluppato e brevettato da Tokuyama Dental, crea integrità al restauro ed uno strato adesivo uniforme.




**Tokuyama Bond Force II Bottle:**  
1 boccetta da 5,0 ml  
25 applicatori  
1 coppetta miscelazione

**Tokuyama Bond Force II Pen:**  
1 penna da 2,0 ml  
25 applicatori  
1 coppetta miscelazione

Precisione, adattabilità, facilità di utilizzo e conservazione: la soluzione definitiva per prevenire le infiltrazioni su smalto bisellato.

## Indicazioni:

- Restauri con compositi auto e foto-polimerizzanti a smalto e dentina
- Riparazioni di porcellane e compositi danneggiati

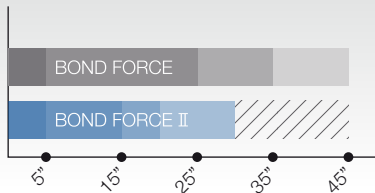

Nelle 4 fasi di lavorazione (applicazione, riposo, asciugatura e polimerizzazione a luce\*) la nuova formulazione del Bond Force II permette un risparmio di tempo di 15 secondi. \*con potenze superiori ai 400 mW/cm<sup>2</sup> (LED, alogena)

BOND FORCE



Temperatura conservazione 0~10°C

Grazie alla nuova formulazione Bond Force II può essere conservato fuori frigo (0~25°C) con data di scadenza di 2 anni.

BOND FORCE II



Temperatura conservazione 0~25°C



Un tempo totale di applicazione ridotto a soli 30 secondi.



Conservazione a temperatura ambiente (0~25°C), fino a due anni.



Asciugatura a temperatura media in soli 5 secondi e 10 secondi di polimerizzazione con lampada a LED o alogena.



Ottimale valore di pH (2.8) che riduce l'idrolisi dei monomeri e minimizza l'attivazione delle MMP (Metalloproteinasi) per prevenire l'invecchiamento delle fibre collagene.



Disponibile in due versioni: sistema di rilascio "a penna" (10,1 mg) per le cavità più piccole e sistema "a bottiglia" (15 mg), ideale per le cavità più grandi. **Nessuno spreco!**



Crea un uniforme, sottile e resistente strato adesivo, per un'eccellente capacità di adattamento alle pareti della cavità e un duraturo legame adesivo.



 Tokuyama Dental

Precisione, adattabilità, facilità di utilizzo  
e conservazione: la soluzione definitiva  
per prevenire le infiltrazioni su smalto bisellato.

[www.tokuyama.it](http://www.tokuyama.it)



**Umbra S.p.A. Distributore esclusivo linea conservativa**  
tel. +39 075 5069040 - fax +39 075 5019861 - [team.mkt@umbra.it](mailto:team.mkt@umbra.it)  
**Tokuyama Dental Italy srl** - tel. +39 0445 334545 - fax +39 0445 339133 - [info@tokuyama.it](mailto:info@tokuyama.it)

NUOVO

