



Ripristino di una classe IV con tecnica diretta in composito

DR. ALLEGRA COMBA

Libero professionista in Torino

Socio Attivo AIC (Accademia Italiana di Odontoiatra Conservativa e Restaurativa)

È stato eseguito un restauro in classe IV con il composito Estelite Asteria con 2 masse (Body+Enamel). Grazie alle sue caratteristiche e alla speciale formulazione, il materiale consente una eccellente integrazione con il dente naturale adiacente, e una lucidabilità che migliora l'aspetto naturale dell'elemento restaurato assicurandone il mantenimento nel tempo.

CASE REPORT



PRIMA E DOPO



Fig. 1 - Rimozione del vecchio restauro in composito



Fig. 2 - Ricostruzione della parete palatina con Asteria A2B con l'ausilio di una guida in silicone



Fig. 3 - Viene effettuato il check dello spessore sempre con l'ausilio della guida in silicone



Fig. 4 - Ricostruzione del corpo dentinale con la massa Asteria A2B



Fig. 5 - Stratificazione della porzione smaltea con Asteria WE (White Enamel)



Fig. 6 - Polimerizzazione con gel di glicerina per inibire lo strato di ossigeno



Fig. 7 - Rilevazione della macro e micro tessitura di superficie prima della lucidatura finale



Fig. 8 - Completamento del restauro (proiezioni diverse)



Fig. 9 - Completamento del restauro (proiezioni diverse)