



# Applicazione clinica: tecnica diretta

**DR. GIULIO PAVOLUCCI**

Libero professionista in Siena e Cortona (AR)

Per evidenziare la versatilità di Tokuyama Universal Bond si noti la cavità mordenzata solo con Selective Etch, ma allo stesso modo si può utilizzare la tecnica Total Etch. La stessa versatilità si può notare applicando solo uno strato flowable di Tokuyama Universal Flow HIGH per poi procedere con il layering di Estelite Asteria. Oppure optare per un restauro bulk, utilizzando Estelite Bulk Fill Flow.

CASE REPORT



Cavità isolata, preparata e rifinita



Mordenzatura selettiva dello smalto



Mordenzatura totale della cavità (opzionale)



Tokuyama Universal Bond  
flaconi A&B



Dispensare nella coppetta una goccia flacone A



Dispensare nella coppetta una goccia flacone B



Miscelare l'adesivo



Applicazione dell'adesivo in cavità



Ibridizzazione di tutte le pareti della cavità



Applicazione soffio d'aria indiretto



Opzione 1: applicazione di flow come protective adhesion layer prima del composito (tecnica di stratificazione incrementale)



Opzione 2: realizzare il restauro con tecnica bulk utilizzando Estelite Bulk Fill Flow fino a 4mm.



Fotopolimerizzare il composito (single layer o bulk)