



2) EVITARE l'esposizione diretta alla luce e al calore.  
3) NON utilizzare ESTELITE UNIVERSAL FLOW dopo la data di scadenza indicata sulla confezione della siringa o del PLT.

#### ■SMALTIMENTO

Spostare il contenuto di ESTELITE UNIVERSAL FLOW in eccesso facendo uscire il prodotto non utilizzato da SYRINGE o dal PLT fotopolimerizzandolo prima dello smaltimento.

#### ■PROCEDURA CLÍNICA

##### 1. Pulizia

Pulire la superficie del dente con una cappellina di gomma e una pasta detergente priva di fluoro e sciacquare con acqua.

2. Secca del dente

Prima dell'isolamento del dente, selezionare il colore di ESTELITE UNIVERSAL FLOW utilizzando la scheda colore fornita per ESTELITE UNIVERSAL FLOW.

##### 3. Isolamento

Il migliore metodo di isolamento è una diga di gomma.

#### 4. Preparazione della cavità

Preparare la cavità. Quella tara operazione non sia stata eseguita (defetti cervicali privi di care), palpare la superficie del dente con una cappellina di gomma e una pasta detergente priva di fluoro. Sciacquare accuratamente con acqua.

#### 5. Protezione della polpa dentale

Sia spesso applicato un tamponcino che la cavità è a distanza ravvicinata con la polpa. NON utilizzare MATERIALE A BASE DI EUGENIOL per proteggere la polpa, poiché questi materiali inhibiscono la polimerizzazione di ESTELITE UNIVERSAL FLOW. ESTELITE UNIVERSAL FLOW non è indicato per l'incapciamento diretto della polpa.

#### 6. Sistema adesivo

Applicare il sistema adesivo secondo le istruzioni del produttore.

- In caso di restauri con porcellana/composito, non dimenticare di trattare la superficie del resturo con agente di scorrimento PRIMA di procedere al trattamento con adezivo.

##### 7. Erogazione

- 7.1 PLT (Medium)

Si prega di leggere le ■NOTAS ESPECIALES PARA EL USO DE LOS PLT prima dell'uso.

- 7.2 SYRINGE (Medium & Super Low)

- Tenere il beccuccio, ruotare il cappuccio in senso antiorario ed estrarlo. [1]

- Tenere il beccuccio e posizionarvi il puntale erogatore (puntale di metallo). Girare il puntale erogatore in senso orario fino a quando scatta il blocco di sicurezza. [2]



- Gli accessori e la punta della siringa sono destinati esclusivamente alla siringa L-SYRINGE di ESTELITE UNIVERSAL FLOW. Utilizzare i puntali erogatori acciauii (puntali di metallo).


- I puntali erogatori (TOKUYAMA Dispensing Tip) sono anche venduti separatamente.

- Utilizzare guanti non contaminati quando si maneggia la siringa e si applica il puntale erogatore.

- 7.3 SYRINGE (High, Medium & Super Low)

- Tenere il beccuccio, ruotare il cappuccio in senso antiorario ed estrarlo. [1]

- Tenere il beccuccio e posizionarvi il puntale erogatore (puntale di plastica). Girare il puntale erogatore in senso orario fino a quando scatta il blocco di sicurezza. [2]

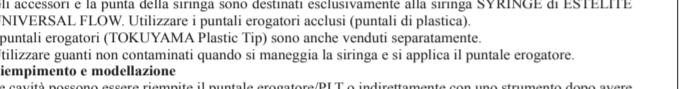

- Gli accessori e la punta della siringa sono destinati esclusivamente alla siringa SYRINGE di ESTELITE UNIVERSAL FLOW. Utilizzare i puntali erogatori acciauii (puntali di plastica).

- I puntali erogatori (TOKUYAMA Plastic Tip) sono anche venduti separatamente.

- Utilizzare guanti non contaminati quando si maneggia la siringa e si applica il puntale erogatore.

**8. Restaurazione**

Le cavità possono essere riempiti il punto erogatore/PLT o indirettamente con uno strumento dopo avere estratto la pasta sul blocco di miscelazione. Gli incrementi non devono superare la profondità indicata in quel momento (vedere la tabella precedente).

- Non applicare una forza eccessiva per estrudere il materiale dalla siringa o dal PLT subito dopo il prelievo dal frigorifero.

- Non utilizzare ESTELITE UNIVERSAL FLOW con composto di resina di altre mache o con altri colori di ESTELITE UNIVERSAL FLOW per evitare una polimerizzazione incompleta o la contaminazione con bolle d'aria.

- Nel caso di utilizzo di una siringa, dopo fatto uscire la pasta, rimuovere ed eliminare il puntale erogatore. Fuggere con una garza e applicare il cappuccio immediatamente.

- Questo prodotto fornito non stiene e non è prevista la sterilizzazione della parte dell'utente.

#### 9. Polimerizzazione

Fotopolimerizzare ciascun incremento per almeno il tempo indicato (vedere la tabella precedente).

- Qualora sul composto polimerizzato siano stratificate resine composite di altre marche, attenersi alle relative istruzioni.

**10. Postura**

Modellare e lucidare il resturo. Per la finitura, utilizzare dischi di finiture e/o punti diamantati fine. Per le superfici prossimali, usare strumenti di metallo o in vetro per finitura. Per lucidare, utilizzare punte di gomma o qualcosa altrettanto di lucidatura appropriato. Per la lucidatura finale, utilizzare dischi di ferro o dischi di zirconia con pasta lucidante o altro strumento di lucidatura appropriato.

L'utente o/o il paziente sono tenuti a segnalare qualsiasi evento avvenuto grave occorso in relazione al dispositivo al fabricante e all'autorità competente dello Stato Membro in cui l'utente o/o il paziente risiede.

**NOTA IMPORTANTE:** Il produttore non è responsabile di danni o lesioni causate dall'uso improprio di questo prodotto. Alla persona responsabile dell'utilizzatore professionale assicurarsi, prima dell'uso, che il prodotto sia idoneo per il tipo d'intervento previsto.

Le specifiche sono soggette a varianza senza preavviso.

La variazione delle specifiche del prodotto può comportare anche la modifica delle istruzioni e delle precauzioni d'uso.

#### PORTUGUÉS

Leia cuidadosamente todas as informações, precauções, notas e materiais antes de usar ESTELITE UNIVERSAL FLOW.

#### ■DESCRIÇÃO DO PRODUTO E INFORMAÇÕES GERAIS

1) ESTELITE UNIVERSAL FLOW é uma resina composta de baixa viscosidade, fotopolimerizável e radiopaca para uso em restaurações nos dentes anteriores e posteriores. A colocação direta de ESTELITE UNIVERSAL FLOW é conceput para a polimerização completa. O seu tempo de polimerização é de 10 a 20 segundos.

2) ESTELITE UNIVERSAL FLOW é uma resina composta de baixa viscosidade, fotopolimerizável e radiopaca para uso em restaurações nos dentes anteriores e posteriores. A colocação direta de ESTELITE UNIVERSAL FLOW é conceput para a polimerização completa. O seu tempo de polimerização é de 10 a 20 segundos.

3) ESTELITE UNIVERSAL FLOW é disponivel em SERINGA (L-SYRINGE) ou SYRINGE (someter Medium) ou em individuais "Pre Loaded Tip" (PLT someter Medium).

#### ■TONALIDADE

As tonalidades disponiveis para cada tipo são as seguintes:

Tipo	Carregamento do Material de Preenchimento
High	69% peso (55% volume)
Medium	71% peso (57% volume)
Super Low	70% peso (56% volume)

- Os Accessórios e a Ponta de Dosagem foram projetados exclusivamente para o L-SYRINGE do ESTELITE UNIVERSAL FLOW. Usar as Pontas de Dosagem (pontas metálicas) agradáveis.

- As Pontas de Dosagem (TOKUYAMA Plastic Tip) também são vendidas separadamente.

- 8. Observação e contorno

As cavidades podem ser diretamente obturadas com um instrumento depois da extração da pasta de um bloco de mistura. Os incrementos não devem exceder a profundidade de polimerização a um tempo (consulter a tabella mencionada acima).

- NÃO misturar ESTELITE UNIVERSAL FLOW com outras marcas de resina composta ou outras tonalidades de ESTELITE UNIVERSAL FLOW, para evitar uma polimerização incompleta ou a formação de bolhas de ar.

- Caso seja necessário aplicar a pasta de um bloco de mistura, deve-se aplicar a pasta de um bloco de mistura de ESTELITE UNIVERSAL FLOW, para evitar uma polimerização incompleta ou a formação de bolhas de ar.

- Caso seja necessário aplicar a pasta de um bloco de mistura, deve-se aplicar a pasta de um bloco de mistura de ESTELITE UNIVERSAL FLOW, para evitar uma polimerização incompleta ou a formação de bolhas de ar.

- 9. Polimerização

Moldar e polir a restauração. Para o acabamento, usar discos de acabamento e/ou pontas de diamante de acordo com a especificação. Usar fitas de acabamento metálicas ou fitas de polimento em vinil para a remoção de contração de polimerização reduzida devido à sua forma redonda. O material de Preenchimento estético contido no ESTELITE UNIVERSAL FLOW (tamanha médio das partículas: 200 nm) tampons de partícula indio: 100 a 300 nm) facilita uma excelente retención de brilho e resistencia ao desgaste.

- Por favor, consulte o seu distribuidor local para informação sobre as tonalidades disponiveis.

#### ■INDICAÇÕES

- Restaurações diretas nos dentes anteriores e posteriores

- Base ou revestimento de cavidade

- Vedamento de cavidades preparadas antes de confeccionar as restaurações indiretas

- Reparo de porcelana/composito

#### ■CONTRA-INDICAÇÕES

ESTELITE UNIVERSAL FLOW contém monómeros de metacrilato e absorvedor de UV. NÃO usar ESTELITE UNIVERSAL FLOW em pacientes alérgicos ou hiperresistentes aos monómeros de metacrilato e monómeros de absorvedor de UV.

- A utilização de ESTELITE UNIVERSAL FLOW se os solos de segurança se encontrarem quebrados ou parcerem ter sido adulterados.

4) SE ESTELITE UNIVERSAL FLOW causar reação alérgica de hiperresistência, interromper imediatamente o seu uso.

5) Ao utilizar ESTELITE UNIVERSAL FLOW use sempre luvas de estetico (plastic, vinyl ou latex) para evitar a possibilidade de reações alérgicas ou monómeros de metacrilato ou absorvedor de UV. Notas: Certas substâncias/materials podem penetrar através das luvas de estetico. Se ESTELITE UNIVERSAL FLOW entrar em contato com as luvas de estetico, retire e descarte as luvas e lave as mãos cuidadosamente (deve ser quanto possível).

6) Evitar o contacto de ESTELITE UNIVERSAL FLOW com os olhos, membranas mucosas, pele e couro.

- Se ESTELITE UNIVERSAL FLOW entrar em contato com os olhos, lave com agua em abundância e contatar imediatamente um oftalmologista.

- Se ESTELITE UNIVERSAL FLOW entrar em contato com as membranas mucosas, limpe imediatamente a área afetada e lave com agua em abundância, depois de terminada a restauração.

- Se ESTELITE UNIVERSAL FLOW entrar em contato com a pele ou com a roupa, sature de imediato

#### ■PRECAUÇÕES

1) NÃO usar ESTELITE UNIVERSAL FLOW para nenhuma outra propósto que não sejam os listados nessas instruções. Use ESTELITE UNIVERSAL FLOW apenas no sentido destas instruções.

2) ESTELITE UNIVERSAL FLOW foi desenvolvido para venda e uso exclusivo por profissionais de saúde dental licenciados. Não foi desenvolvo para venda nem uso pessoal não qualificado na área de saúde dental.

3) NÃO usar ESTELITE UNIVERSAL FLOW se os solos de segurança se encontrarem quebrados ou parcerem ter sido adulterados.

4) SE ESTELITE UNIVERSAL FLOW causar reação alérgica de hiperresistência, interromper imediatamente o seu uso.

5) Ao utilizar ESTELITE UNIVERSAL FLOW use sempre luvas de estetico (plastic, vinyl ou latex) para evitar a possibilidade de reações alérgicas ou monómeros de metacrilato ou absorvedor de UV. Notas: Certas substâncias/materials podem penetrar através das luvas de estetico. Se ESTELITE UNIVERSAL FLOW entrar em contato com as luvas de estetico, retire e descarte as luvas e lave as mãos cuidadosamente (deve ser quanto possível).

6) Evitar o contacto de ESTELITE UNIVERSAL FLOW com os olhos, membranas mucosas, pele e couro.

- Se ESTELITE UNIVERSAL FLOW entrar em contato com os olhos, lave com agua em abundância e contatar imediatamente um oftalmologista.

- Se ESTELITE UNIVERSAL FLOW entrar em contato com as membranas mucosas, limpe imediatamente a área afetada e lave com agua em abundância, depois de terminada a restauração.

- Se ESTELITE UNIVERSAL FLOW entrar em contato com a pele ou com a roupa, sature de imediato

#### ■ROMÂNĂ

Cită atenție toate informațiile, măsurile preventive, observațiile și instrucțiunile înainte de a utiliza ESTELITE UNIVERSAL FLOW.

#### ■DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN GENERAL

1) ESTELITE UNIVERSAL FLOW es una resina compuesta de baixa viscosidade, fotopolimerizable e radiopaca para uso em restaurações nos dentes anteriores e posteriores. A colocação direta de ESTELITE UNIVERSAL FLOW é conceput para a polimerização completa. O seu tempo de polimerização é de 10 a 20 segundos.

2) ESTELITE UNIVERSAL FLOW es una resina composta de baixa viscosidade, fotopolimerizable e radiopaca para uso em restaurações nos dentes anteriores e posteriores. A colocación directa de ESTELITE UNIVERSAL FLOW es conceput para a polimerización completa. O seu tempo de polimerización é de 10 a 20 segundos.

3) ESTELITE UNIVERSAL FLOW é disponivel em SERINGA (L-SYRINGE) ou SYRINGE (someter Medium) ou em individuais "Pre Loaded Tip" (PLT someter Medium).

#### ■TONALIDADE

As tonalidades disponiveis para cada tipo são as seguintes:

Tipo	Tonalidade
High	A1, A2, A3, A3.5, OP2, OP3, OP4
Medium	CE, BW, A1, A2, A3, A4, A5, B3, OP2, OP3, OP4
Super Low	A1, A2, A3, A3.5, A4, A5

- As tonalidades opalescentes (OP2, OP3, OP4) têm uma opacidade adequada projetada para bloquear o brilho escuro que vem através da cavidade oral (restauração de Classe III e IV). As tonalidades opalescentes só bem foram projetadas para mascarar uma pequena mancha ou reconstruir um dente aferido.

- Por favor, consultar o seu distribuidor local para informação sobre as tonalidades disponiveis.

#### ■INDICAÇÕES

- Restaurações diretas nos dentes anteriores e posteriores

- Base ou revestimento de